



كيفية تنفيذ الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام AED



HEART GUARDIAN

01



اتصل بخدمات الطوارئ على الفور واطلب من أي شخص
إحضار جهاز AED

• اضغط على كتف المريض

• إذا كان المريض فاقدًا للوعي والتنفس غير طبيعي ،

اتصل بخدمات الطوارئ واطلب جهاز AED



02



اضغط على صدر المريض على الفور

• ضع كلتا يديك معًا في منتصف الصدر واضغط بسرعة على صدر المريض مرتين في الثانية

• اضغط بشكل متكرر وعميق وبقوة دون انقطاع



03



قم بتشغيل جهاز AED وقم بتركيب اللاصقات

• قم بتشغيل الجهاز وربط اللاصقات على صدر المريض حسب الصورة

• إذا كان المريض طفلاً ، فقم بتثبيت اللاصق في منتصف الصدر ووسط الظهر



04



اتبع التوجيه الصوتي لعمل **صدمة كهربائية** إذا لزم الأمر

• إذا كانت العبارة تقول "تحليل ، ابق بعيدًا عن المريض" **"Analyzing, stay clear of the patient"** ابتعد عن المريض على الفور

• إذا سمعت عبارة "هناك حاجة لصدمة كهربائية" ، **"Electric shock is needed"** ، فاضغط على زر الصدمة **البرتقالي الواض**

فاضغط على زر الصدمة البرتقالي الواض



05



استأنف **ضغوطات الصدر** على الفور

• بعد الضغط على زر الصدمة ، استأنف الضغط على الصدر على الفور

• كرر عملية الصعقة كل دقيقتين ، وفقًا لتعليمات جهاز AED

• استمر في الإنعاش القلبي الرئوي حتى وصول خدمات الطوارئ



Technology for Life

RADIAN QBio